
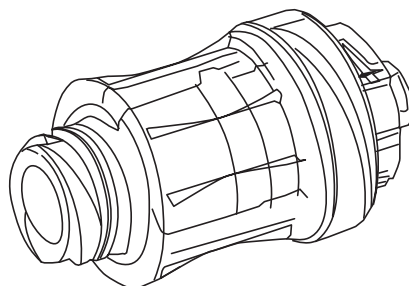


INSTRUÇÕES DE USO

Safeflow

Conteúdo

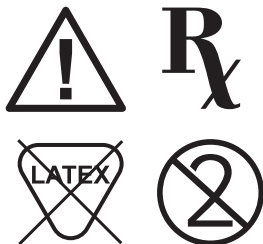

REF 3150B

Estéril - Esterilizado por de etileno.

Produto de uso único - Proibido reprocessar.

A válvula Safeflow está destinado a aspirar ou injetar fluidos conforme necessário.

Condições de armazenamento:


Armazenar em local seco, à temperatura ambiente e protegido da luz.

Advertências:

- Para prevenir danos na válvula, NÃO USE agulhas ou cânulas para acessar a válvula;
- Cuidadosamente, seguir as instruções de uso abaixo para manter a integridade da válvula.
- Usar somente dispositivos de conexão padrão Luer; seringas ou conectores fora do padrão podem danificar a válvula. O padrão de conexão Luer deve estar de acordo com os padrões ISO 594-1 e/ou ISO 594-2. Seringas e conectores Luer macho têm uma larga variedade de configurações e pode variar significativamente em design e dimensões.
- NÃO APERTE DEMAIS a conexão. NÃO USE nenhum instrumento para apertar a conexão.

Instruções de uso:


1. Usando técnica asséptica, remova o dispositivo estéril da embalagem. Descartar se a embalagem não estiver intacta.
2. Limpe a superfície da válvula usando álcool estéril e algodão. Deixe secar;

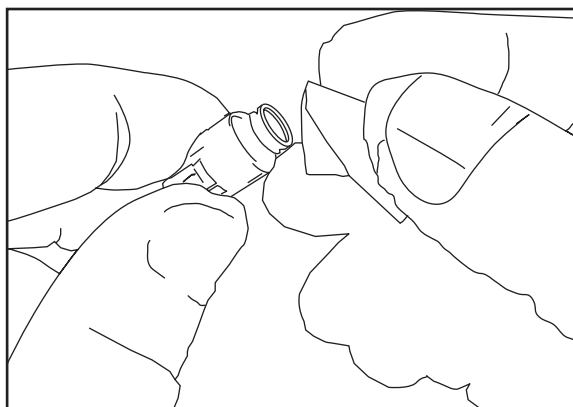


INSTRUÇÕES DE USO

3. Cuidadosamente, conecte a seringa ou o conjunto de extensão para a válvula empurrando a seringa ou outra conexão Luer diretamente dentro da válvula usando um movimento rotatório no sentido horário. Não tente inserir formando um ângulo ou forçar a abertura da fenda da válvula;
4. Não aperte demais a conexão. Apertar em excesso pode danificar o corpo da válvula;

Conector Luer Slip Macho

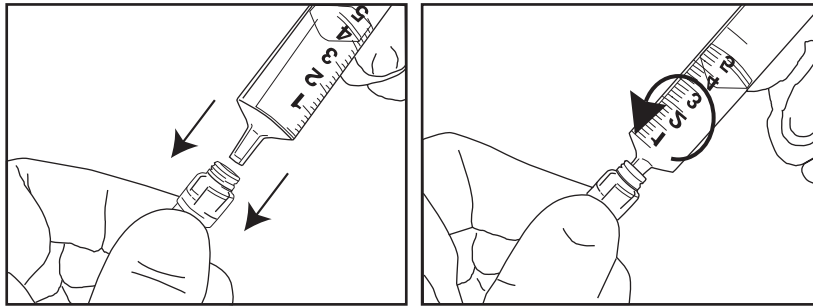

Conector Luer Lock Macho

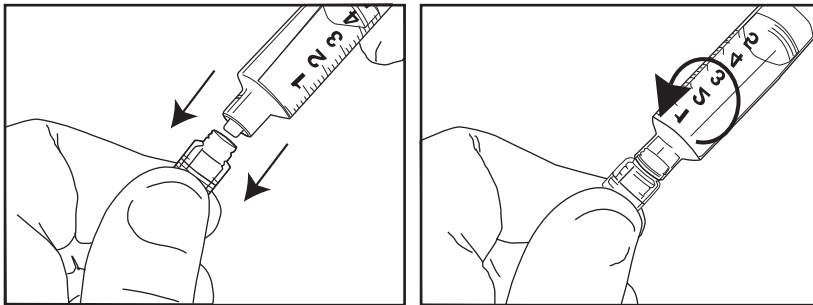

5. Torcer para a esquerda para desconectar. A válvula fecha completamente após cada uso e portanto não necessita de um local de injeção separado;
6. Embutir a válvula após cada uso conforme protocolo de instalação;
7. Troque a válvula conforme protocolo de instalação;
8. Dispor de um dispositivo conforme protocolo de instalação para materiais biocontaminados.

Importado e Distribuído por:

B | BRAUN

Laboratórios B. Braun S.A.

Av. Eugênio Borges, 1092 e Av. Jequitibá,

09 Arsenal - CEP:24751-000.

São Gonçalo – RJ – Brasil

Farm. Responsável: Sônia M. Q. de

Azevedo CRF-RJ nº: 4260

Número de Cadastro: 8.01369.99017

CNPJ: 31.673.254/0001-02

Indústria Brasileira

0800-0227286

Fabricado por:

Quest Medical, Inc.

One Allentown Parkway

Allen, Texas 75002

USA

904331 REV C